



O PRODUKCIE

NOSOSTOP to wyjątkowy żelowy zabieg, który szybko zatrzymuje krwawienie z nosa. Bezpieczny, do samodzielnego wykonania. Przydatny w każdej domowej apteczce.

KRWAWIENIE Z NOSA?

Krwawienie z nosa jest jednym z najczęściej występujących krwawień. Szacuje się, że od 5 do 10% populacji doświadcza krwawienia z nosa przynajmniej raz w roku. Krwawienie z nosa zwykle ustępuje samoistnie, na ogół zatrzymuje się po pewnym czasie. Jednak należy traktować je poważnie.


Może istnieć wiele przyczyn lokalnych, takich jak: obce przedmioty wewnątrz nosa, alergia, katar

i przeziębienie, chemiczne czynniki drażniące, niektóre leki działające miejscowo, niska wilgotność powodująca nadmierne wysuszenie błony śluzowej nosa.

JAK DZIAŁA NOSOSTOP?

Substancją aktywną produktu jest glicyna – aminokwas produkowany przez organizm ludzki, wchodzący w skład białek. Jednym z białek zawierającym dużą ilość glicyny jest kolagen. Kolagen jest potrzebny, aby umożliwić efektywną aktywność płytek krwi i zahamować krwawienie.


Schemat działania NOSOSTOP

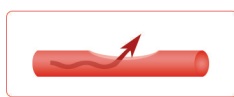


uszkodzone naczynie, krew wycieka



ściana naczynia krwionośnego reaguje skurczem powodując zwężenie światła naczynia

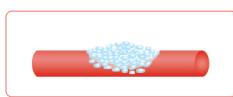

kolagen z uszkodzonego śródbłonna naczyniowego aktywuje agregację płytek w miejscu uszkodzenia

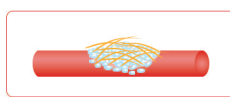

elementy osocza wraz z włóknami fibryny koagulują tworząc skrzep




fibrinoliza - skrzep fibrynowy ulega rozpuszczeniu i naczynie odzyskuje swoją ciągłość w okresie ok 10 dni. Krew normalnie przepływa przez naczynie krwionośne.

NOSOSTOP

JAK STOSOWAĆ NOSOSTOP?

Aplikowany żel powinien być stosowany do nosa. Jeżeli krwawienie jest zlokalizowane w przedniej części nosa jedna tubka jest wystarczająca do zahamowania krwawienia. W przypadku krwawienia z tylnej części nosa dwie, a w wyjątkowych sytuacjach trzy tubki mogą być potrzebne.

SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU NOSOSTOP

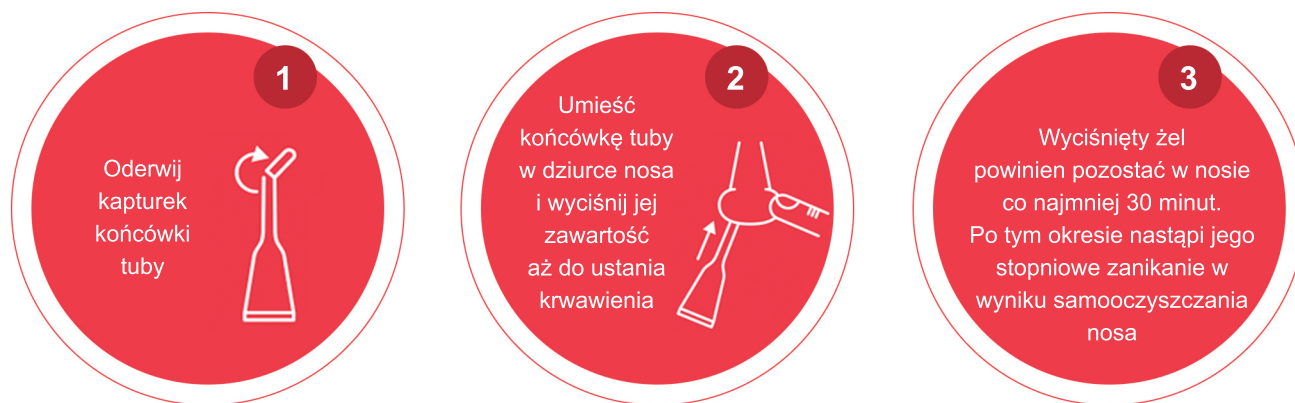

KTO MOŻE STOSOWAĆ NOSOSTOP?

Dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia lub od wieku, kiedy dziecko może zaaplikować sobie NOSOSTOP samodzielnie.
Dzieci w wieku 2-7 lat pod nadzorem rodziców.

CZY NOSOSTOP JEST BEZPIECZNY?

Wyrób medyczny Nosostop jest bezpieczny w użyciu i można go stosować zarówno w przypadku gwałtownego jak i łżejszego krwawienia. Działa w sposób naturalny, delikatnie naciskając na miejsce krwawienia.

Dostępne opakowania 1 lub 2 tuby w opakowaniu.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Pharmatonica Sp. z o.o., F.Klimczaka 17/80, 02-797 Warszawa

